

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR ROTIERENDE INSTRUMENTE

Sekudrill®

Desinfektionsmittel für Medizinprodukte

Speziell für rotierende Präzisions-
instrumente.

- ▲ Umfassendes Wirkspektrum
- ▲ Gute Materialverträglichkeit
- ▲ Gebrauchsfertige Lösung



Sekudrill®

Desinfektionsmittel für Medizinprodukte

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren.	Sicherheit im Umgang mit Infektionsrisiken
Gebrauchsfertig	Einfache Handhabung
Leistungsstarke Wirkstoffzusammensetzung	Kurze Einwirkzeiten, praxismgerechte, wirtschaftliche Lösung für rotierendes Instrumentarium
Materialverträgliche Rezepturkomponenten	Alle Instrumente aus Stahl und Stahllegierungen werden schonend desinfiziert

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste Instrumentendesinfektion		
Instrumentendesinfektion gemäß VAH (DGHM Testmethode Stand 2001) Bakterizid, levurozid bei niedriger und hoher Belastung	unverdünnt	5
IHO-Viruzidie-Liste		
Viruzid*	unverdünnt	15

* gemäß EN 14476

EINSATZBEREICHE

Zur Desinfektion von medizinischen Instrumenten, speziell rotierende Präzisionsinstrumente wie Werkzeugstahl-, Hartmetall- und Diamantschleif-Instrumente. Einsetzbar im Fräsator oder Ultraschallbad. Für Instrumente, die gegen hochalkalische Medien nicht beständig sind, wie elastische Polierer, keramische Schleifkörper und Wurzelkanalinstrumente, empfehlen wir unsere Produkte, Sekusept® Extra N oder Sekusept® PLUS.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE


Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



GEBRAUCHS- FERTIG. MATERIAL- VERTRÄGLICH.

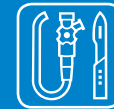

Desinfektionsmittel
für Medizinprodukte

ANWENDUNGSHINWEISE

Instrumente sofort nach Gebrauch in die unverdünnte Sekudrill® Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Zur Reinigung Instrumente gründlich mit Mechanik bürsten bzw. abwischen. Nach vorgeschriebener Einwirkzeit die Instrumente der Lösung entnehmen und mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen und sofort mit saugfähigem Einmaltuch abtrocknen. Ggf. noch sichtbare Verschmutzungen abbürsten und Instrumente erneut einlegen.

Bitte beachten Sie auch die Aufbereitungsempfehlung der Instrumentenhersteller.

Aus hygienischen Gründen Lösung täglich wechseln. Aluminiumteile nicht in Sekudrill® einlegen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
50 g Propylenglykol,
5 g Kaliumhydroxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Sekudrill® Griffflasche mit Messbecher	4 x 2 L	30 311 30 PZN 030 747 89

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.