


DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSMITTEL

Sekumatic® FDR

Aufbereitung von Instrumenten, Steckbecken,
Betten und Atemschutzmasken

Die aldehydfreie und effiziente Lösung
für die chemo-thermische Aufbereitung
in Betten- und Wagendekontaminations-
anlagen.

- ▲ Sichere Desinfektion
- ▲ Effektive Reinigung
- ▲ Gute Materialverträglichkeit

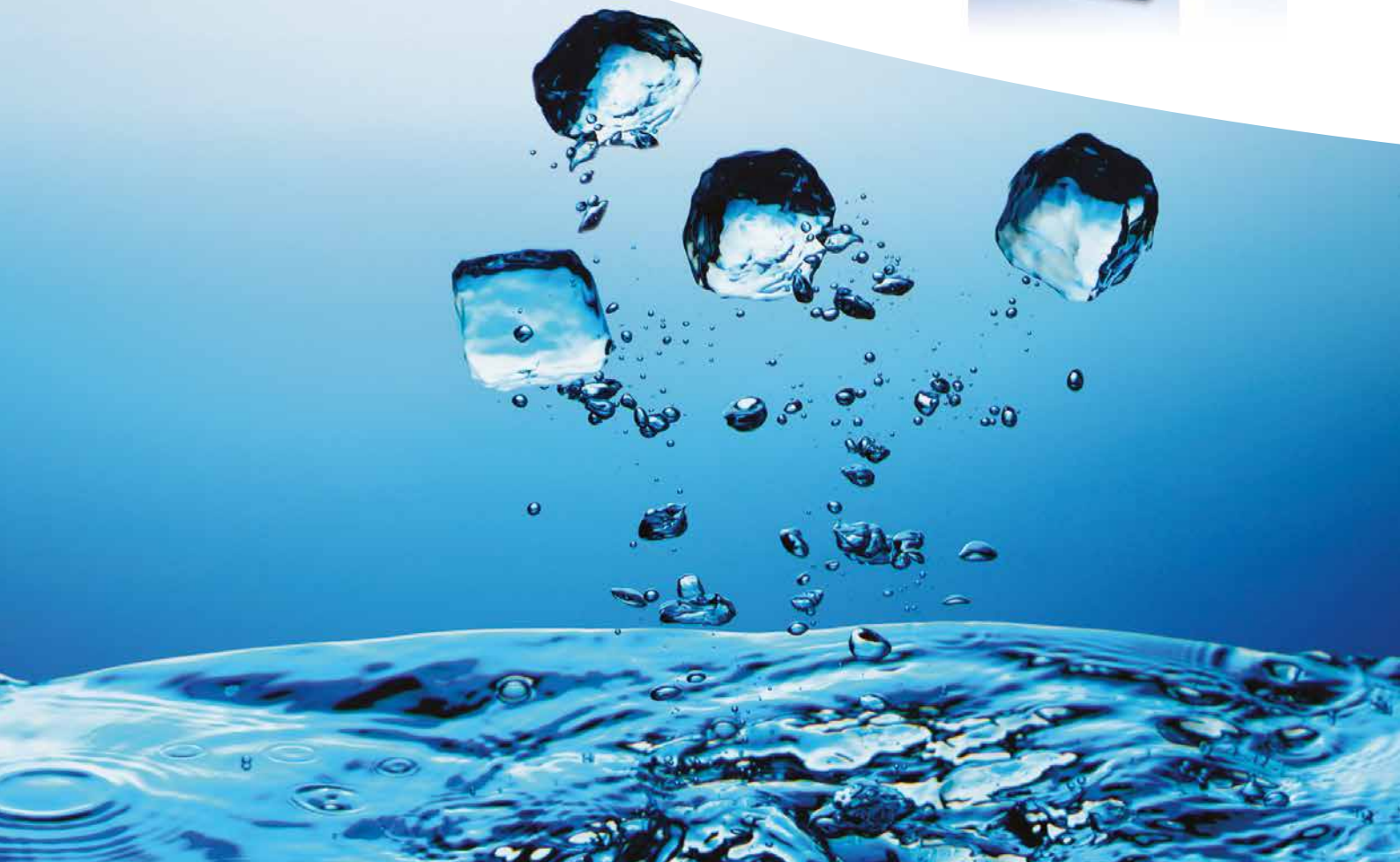

Sekumatic® FDR

Aufbereitung von Instrumenten, Steckbecken,
Betten und Atemschutzmasken

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Aldehydfrei mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®	Sichere Desinfektion bei 60 °C, anwendungsfreundliche Formulierung ohne Aldehyde
Tensidarm, pH-neutral	Besonders schaumarm, sehr gute Materialverträglichkeit, starke Reinigungsleistung
Optimal abgestimmte Rezepturkomponenten	Erfüllt die Anforderungen des „AK-BWA“
Begutachtet durch die DEKRA EXAM (Prüfstelle für Atemschutz)	Sichere und materialschonende Desinfektion von Atemschutzgeräten
Hohe Anwendungssicherheit durch automatische Dosierung	Genauere Dosierung. Kein Produktkontakt des Anwenders

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte	20 °C	1,03 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 5,5
pH-Wert* (Lösung, 5 - 10 ml/L in VE-Wasser)	20 °C	6 - 8

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	EINWIRKZEIT Sek.
Bakterizid (EN 13727) bei niedriger / hoher Belastung	0,15	30 (bei 55 °C)
Levurozid (EN 13624) bei niedriger Belastung	0,5	60 (bei 55 °C)
Levurozid (EN 13624) bei hoher Belastung	0,5	150 (bei 55 °C)
Viruzid nach RKI 1/2004	1	300 (bei 60 °C)

Bei Einsatz in chemisch-thermischen Steckbeckenautomaten wird eine Anwendungskonzentration von 0,5 bis 1% bei 60 °C und mind. 60 Sek. Einwirkzeit, bei benötigter Viruzidie 5 Min., empfohlen.

EINSATZMÖGLICHKEIT	DOSIERUNG	FLOTTEN-VERHÄLTNIS**	DESINFEKTIONSTEMPERATUR	EINWIRKZEIT
Waschschleudermaschine Desinfektion von Atemschutzgeräten	10 ml/L	1:5	60 °C	5 Min.
Reinigungs- & Desinfektionsgerät (RDG) Desinfektion von Atemschutzgeräten	10 ml/L		60 °C	5 Min.

** 1 L Wasser pro kg Trockenwäsche (Nennbelastung) der Maschine im Desinfektionswaschbad (Hauptwäsche) (Beispiel: 1:5 = 5 L/kg Trockenwäsche). Anwendungsbeispiel: ml je kg Nennbelastung (Beispiel bei einer 14 kg Maschine: 50 ml x 14 kg = 700 ml Dosiermenge)

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SICHER.
ALDEHYDFREI.



Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
für Medizinprodukt
D BIOZID N-35090

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei der Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) im medizinischen Bereich wird eine Anwendungskonzentration von 10 ml/L bei 60 °C und 5 Minuten Einwirkzeit empfohlen. Dabei sind die Angaben des Anlagenherstellers zu berücksichtigen.

In Betten- und Containerwaschanlagen werden Anwendungskonzentrationen von 5 - 10 ml/L bei 60 °C und 90 - 120 Sekunden Einwirkzeit empfohlen.

Bei der Verwendung in Waschschleudermaschinen und RDGs zur Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken wird die Dosierung von Sekumatic® FDR ab einer Temperatur von 60 °C empfohlen. Dabei sind die Angaben des Anlagenherstellers zu berücksichtigen.

ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, alkoholische Lösemittel, Komplexbilder, Korrosionsinhibitoren.

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten: 2 g Glucoprotamin®, 2 g Poly(oxy-1, 2-ethandiy), alpha-[2-(didecylmethyl-ammonio)ethyl]-Omega-hydroxy-propanoat (Salz), 0,75 g Benzalkoniumchlorid

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekumatic® FDR Kanister	3 x 5 L	30 438 20 PZN 063 044 74
Sekumatic® FDR Kanister	20 L	30 438 40
Sekumatic® FDR Fass	200 L	30 438 50

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

