

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELL- DESINFEKTION ALS SCHAUM-SPRAY

Incidin® Foam

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray
zur alkoholischen Schnelldesinfektion

**Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionssicherheit auf
allen alkoholbeständigen Flächen,
selbst in Risikobereichen.

- ▲ Keine Aerosolbildung
- ▲ Exzellente Schaumbildung
- ▲ Angenehmer Geruch



Incidin® Foam

Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Durch Schaumapplikation keine Vernebelung von Wirkstoffen, niedriger Alkoholgehalt	Sicheres Arbeiten für den Anwender, ohne Gefahr des Einatmens von Aerosolen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)		
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
IHO-Viruzidie-Liste		
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	konzentriert	0,5
Rotavirus	konzentriert	5
Papovavirus/Polyomavirus/SV40	konzentriert	15
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	3
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)		
Bakterizid, levurozid, ohne Mechanik	konzentriert	1

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

			<ol style="list-style-type: none"> 1 Oberfläche einsprühen 2 Abwischen 3 Antrocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuch einsprühen 2 Abwischen 3 Antrocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Oberfläche einsprühen 2 Antrocknen lassen

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SICHER.
SCHNELL.
EINFACH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.

Ⓢ BIOZID N-12164

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige Lösung zum Sprühen und Einschäumen. Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m²) und antrocknen lassen. Fläche komplett benetzen. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 20 g 2-Propanol, 10 g Ethanol, 0,2 g Benzalkoniumchlorid, 0,01 g Glucoprotamin®

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Foam Flasche	16 x 750 ml	30 217 80 PZN 045 242 66
Incidin® Foam Kanister	2 x 5 L	30 134 20 PZN 009 852 37
Schaum-sprüh-pistole für 750 ml Flasche	5 x 10 Stück	10 000 046 PZN 070 209 80

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.