

ZUR REINIGUNG MEDIZINISCHER INSTRUMENTE

Sekusept® MultiEnzyme P

Leistungstarker Enzymreiniger

- ▲ Optimal abgestimmte
4 Enzym-Kombination
- ▲ Sehr gute Materialverträglichkeit
- ▲ RKI-konforme, nicht
fixierende Vorreinigung



Sekusept® MultiEnzyme P

Leistungsstarker Enzymreiniger

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Innovative Kombination aus vier Enzymen mit leistungsstarken Tensiden	Starke, selbsttätige Reinigung. Reduziert den Vor- und Nachreinigungsaufwand. RKI-konforme Vorreinigung
Umfassende Materialverträglichkeit	Geeignet für die Vorreinigung von thermolabilen und thermostabilen medizinischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen
2 L Flaschen mit Sichtfenster	Optimale Füllstandskontrolle und sichere Dosierung
Schaumarm	Geeignet für Ultraschallanwendung
Transparent-blaue Einfärbung	Sichtbare Reinigungslösung bei guter Erkennbarkeit der Instrumente

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN		
Dichte	20 °C	1,06 g/cm ³
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	ca. 8,6
pH-Bereich* (1 - 2%ige Lösung)	20 °C	ca. 6 - 7

* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

LEISTUNGS-
STARK.
VERTRÄGLICH.



Reinigungsmittel
für Medizinprodukte

ANWENDUNGSHINWEISE

In Abhängigkeit von Verschmutzungsart und dem Grad der Anschmutzung eine 0,3 bis 2%ige Anwendungslösung ansetzen (3 - 20 ml pro Liter Wasser (max. 25°C)). Instrumentarium in die Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach Bedarf mechanisch reinigen (bürsten, wischen). Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad (min. 5 - 15 Minuten). Instrumente vor weiterer maschineller / manueller Aufbereitung abspülen.

ZUSAMMENSETZUNG

Proteasen, Amylase, Lipase, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Lösemittel, Hilfsstoffe, Emulgatoren, Parfüm

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sekusept® MultiEnzyme P Griffflasche mit Messbecher	4 x 2 L	30 466 50 PZN 013 203 27
Sekusept® MultiEnzyme P Kanister	6 L	30 466 70 PZN 013 203 10

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41(0) 44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

