

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELLDESINFEKTION

Incidin® Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen.

Hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Flächen, selbst in Risikobereichen.

- ▶ Schnell
- ▶ Aldehydfrei
- ▶ Angenehmer Geruch
- ▶ Noroviruzid











Incidin® Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch
Ausgewogene, synergetische Formulierung verschiedener Wirkstoffe, aldehydfrei	Gute Benetzung, schnelle und rückstands-freie Abtrocknung durch Alkohole, dabei mit sehr guter Anwenderverträglichkeit

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)		
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
IHO-Viruzidie-Liste		
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	konzentriert	0,5
Norovirus (MNV)	konzentriert	10
Rotavirus	konzentriert	0,5
Adenovirus	konzentriert	1
Papovavirus/Polyomavirus/SV40	konzentriert	10
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)		
Bakterizid, levurozid, ohne Mechanik	konzentriert	1

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

			<ol style="list-style-type: none"> 1 Oberfläche einsprühen 2 Abwischen 3 Antrocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuch einsprühen 2 Abwischen 3 Antrocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Oberfläche einsprühen 2 Antrocknen lassen

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SCHNELL. ALDEHYDFREI. NOROVIRUZID.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.
Ⓢ BIOZID N-12496

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige Lösung zum Wischen oder Sprühen. Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m²) und antrocknen lassen. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Liquid Flasche	12 x 1 L	30 113 40 PZN 075 030 98
Incidin® Liquid Kanister	2 x 5 L	30 113 50 PZN 075 030 81
Incidin® Liquid Kanister	30 L	30 113 60
Sprühpistole für 1 L Flasche	5 x 10 Stück	10 005 074 PZN 009 566 03

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

