

# TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

## Incides® N

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material

**Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen.**

Hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Flächen. Wirksamkeit anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

- ▶ Kurze Einwirkzeiten
- ▶ Direkt einsetzbar
- ▶ Dermatologisch begutachtet




# Incides® N

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material


Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Nachgewiesene Wirkstoffabgabe aus dem Tuch in angegebener Konzentration	Hohe Anwendersicherheit, Wirksamkeitsgutachten basieren auf den realen Arbeitsbedingungen
Gebrauchsfertige Tücher mit besonders kurzen Einwirkzeiten	Optimale Desinfektion von Medizinprodukten und allen alkoholbeständigen Oberflächen
Dermatologisch begutachtet und mit sympathischer Duftnote	Hohe Anwendersicherheit und angenehm im Gebrauch, ohne Handschuhe anwendbar

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)</b>		
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
<b>IHO-Viruzidie-Liste</b>		
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	konzentriert	0,5
Rotavirus	konzentriert	1
Adenovirus	konzentriert	15
Papovavirus/Polyomavirus/SV40	konzentriert	15
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
<b>Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)</b>		
Tuberkulozid, mit Mechanik	konzentriert	1

## ÖFFNEN UND ENTNEHMEN

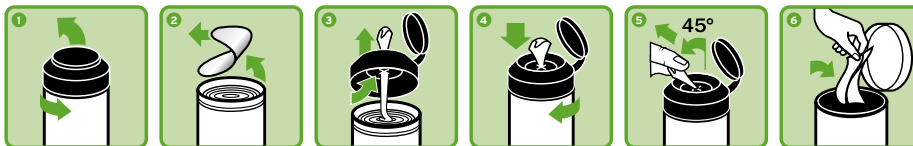

## VERWENDEN DES NACHFÜLLPACKS

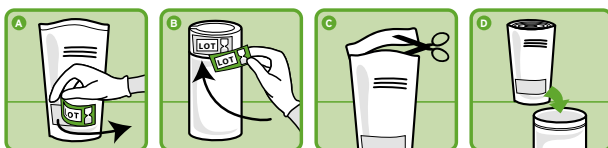

Anschließend Schritte 3 – 6 ausführen.

SCHNELL.  
FLEXIBEL.  
HAUT-  
VERTRÄGLICH.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Ⓢ BIOZID N-12165

## ANWENDUNGSHINWEISE

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material, Hand- und Winkelstücke in der Zahnarztpraxis, Griffstücke, etc., sowie von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände / Flächen abwischen und komplett benetzen. Dose wieder verschließen.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incides® N Dose	6 x 90 Tücher	30 131 50 PZN 018 393 54
Incides® N Nachfüllpack	5 x 90 Tücher	30 131 60 PZN 018 393 60

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.  
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

## ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
+41 (0) 44-877-2000  
www.ecolab.eu

## REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

